

FisioVital

Protocolo de higienização do Theratogs e acessórios.



Pulverizar a superfície da espuma branca (FOAM) e do tecido dourado (GoldTone) entre cada uso dos pacientes, use peróxido de hidrogênio 3%–6% comprado previamente diluído de acordo com o departamento de prevenção / controle de infecção listados nos produtos da clínica.


Pulverize a superfície branca e deixe secar antes do próximo uso do paciente.

O peróxido de hidrogênio diluído em água não irá manchar a roupa do paciente.



Lave roupas e faixas semanalmente (o peróxido de hidrogênio 3% ou Alvejante 2,5% pode ser adicionada ao ciclo de lavagem).

Compre o produto já diluído ao invés de diluir na clínica para evitar problemas com degradação química, mistura e armazenamento de produtos químicos.

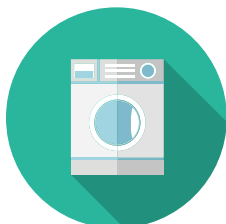

SOBRE THERATOGS

O TheraTogs fornecem uma segunda pele sensível ao velcro®, livre de látex, respirável e confortável, para clínicos envolvidos no tratamento sensorio-motor de pacientes com atraso no desenvolvimento e mal-alinhamentos ortopédicos, para pacientes em reabilitação após lesão cerebral, acidente vascular cerebral, cirurgia ortopédica ou neurocirurgia.

O TheraTogs é feito de um tecido patenteado, respirável, lavável com um lado de espuma feito de um uretano elastomérico à base de água. TogRite™ é uma faixa elastomérica isenta de látex com uma superfície de aderência inerte e à base de silicone.

TheraTogs™ é um produto médico/ortopédico Classe I – com registro na ANVISA. Deve ser utilizado sobre supervisão e orientação médica.